



RECOMANDĂRI GENERALE DE UTILIZARE A TESTELOR RAPIDE ANTIGEN EFECTUATE DIN PROBA DE SALIVĂ

- Se păstrează testele între +2 - +30°C, toate componentele trebuie aduse la temperatura camerei înainte de testare.
- Caseta de testare trebuie utilizată în termen de 15 minute după scoaterea din folia de aluminiu.
- Înainte de colectarea probei de salivă, pacientul nu trebuie să fi mâncat sau să fi băut ceva timp de cel puțin 30 de minute.
- Se asigură permanent dezinfecția corectă a mâinilor și suprafețelor.

Pentru testarea propriu-zisă:

1. Deschideți capacul tubului tampon, apoi introduceți în tub pâlnia de hârtie pentru colectarea salivei.
2. Rugați copilul Dvs. să scuie în pâlnie. Este nevoie de aprox. 1 ml de salivă.
3. Scoateți pâlnia din tub și închideți tubul.
4. Amestecați bine lichidul cu saliva, agitând tubul de 10 ori.
5. Scoateți caseta de testare și folia de aluminiu.
6. Așezați caseta pe o suprafață netedă și curată.
7. Rupeți capacul tubului tampon în punctul de rupere, și adăugați 3 picături din amestecul de salivă și extras de tampon în orificiul de testare al casetei.
8. Așteptați 15 minute și citiți rezultatele.
9. Nu citiți rezultatele după 20 de minute.

Interpretarea rezultatelor:

- **pozitiv:** apar două linii. O linie colorată apare în zona-martor (C) și o altă linie colorată apare la zona de test (T).
- **negativ:** o linie colorată apare în zona-martor (C) și nu apare nicio linie în zona de test (T).
- **invalid:** nu este vizibilă o linie C după 15-20 de minute. Rezultatul testului este, de asemenea, invalid dacă linia T este vizibilă și nu există linia C. În ambele cazuri testul trebuie efectuat cu o nouă casetă de testare.



ÚTMUTATÓ AZ ANTIGÉN GYORSTESZTEK (PAPÍRTÖLCSÉRES NYÁLTESZTEK) HASZNÁLATÁHOZ

Jelen használati útmutató a COVID-19 antigén nyáltesztek szakszerű alkalmazásához nyújt segítséget.

Általános tudnivalók:

- A teszteket +2 - +30 °C közötti hőmérsékleten kell tárolni, használat előtt az alkotórészek legyenek szobahőmérsékletűek.
- Az alumínium védőfólia felbontása után a tesztet azonnal fel kell használni (legtöbb 15 percen belül).
- A teszt elvégzése előtt 30 perccel tilos élelmiszereket/italokat fogyasztani.
- Fokozottan figyeljen a kezek és a felületek fertőtlenítésére!

A tesztelés lépései:

- Készítsen elő egy oldatos fiolát, vegye le a kupakját, majd helyezze bele a papírtölcsért.
- Köptesse gyermekét a tölcsérbe, kb. 1 ml nyálmintára lesz szükség.
- Vegye ki a tölcsért, és helyezze vissza a fiola kupakját.
- Rázza jól össze 10-szer a folyadékot.
- Ezután vegye ki a tesztkazettát az alumínium csomagolásból.
- Helyezze a tesztkazettát egy sima és tiszta felületre.
- Szakítsa le a fiola kupakjának tetejét a jelzésnél, majd 3 csepp mintát cseppentsen a tesztkazetta mintamélyedésébe.
- 15 perc múlva olvassa le az eredményt.
- Ne olvasson le eredményt több mint 20 perc elteltével!

A teszteredmény értelmezése az alábbi módon történik:

Pozitív: Két vonal jelenik meg. Egy színes vonal jelenik meg a kontrollterületen (C), és egy másik színes vonal a teszterületen (T).

Negatív: A kontrollterületen (C) megjelenik egy színes vonal, a teszterületen (T) pedig nem.

Érvénytelen: Nem jelenik meg a kontrollvonal (C) 15-20 perc múlva. Szintén érvénytelen a teszteredmény, ha csak a teszterületen (T) jelenik meg a vonal. Mindkét esetben ismételje meg a tesztet egy új tesztkazettán.